



Getinge Diskdesinfektor WD15

Kompetenskort

För att få godkänt på kompetenskortet för " Getinge Diskdesinfektor WD15" ska även kompetenskort "Rengöring & Desinfektion" vara godkänt.

Funktion

Getinge WD 15 CLARO är en helautomatisk diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av gods på bland annat sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar.

Användning av utrustningen

- Maskinen ska endast användas av operatör som utbildats på maskinen och som är införstådd med de risker arbetet kan innebära.
- Operatören ansvarar för att maskinen används riktigt med avseende på manualer, säkerhetsföreskrifter och lagar.
- Du som operatör, bör även se till att du kan nödlarma själv.
- Felaktigt bruk kan leda till skador på föremål och personskador.

LOKALA FÖRESKRIFTER/ÖVRIGT:

Läs avdelningen lokala riktlinjer.


LEVERANTÖR/KONTAKTUPPGIFTER:

www.getinge.com

VERSION:
RevF


Manöverpanel

Maskinen manövreras från manöverpanelen placerad i luckans överkant.

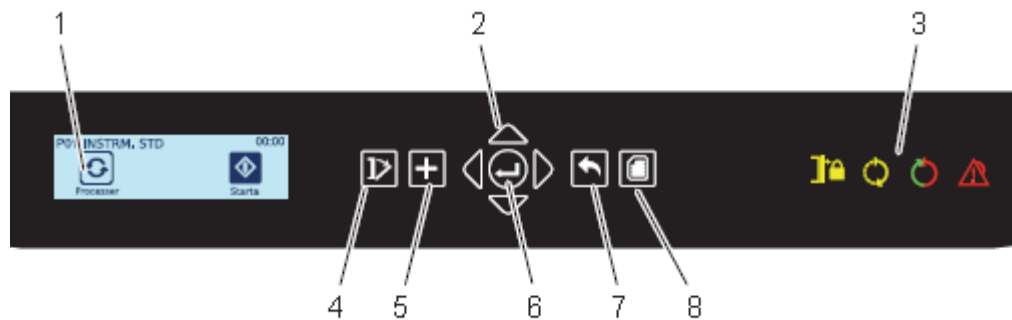









1. Fönster
2. Manöver- och navigeringsknappar
3. Indikatorer
4. Öppna luckan
5. Aktivera displayknappar, (Antal tillgängliga knappar beror på maskintyp)
6. Bekräfta val vid navigering
Starta vald process
Återställ larmsignal vid larm
7. Backa ett steg
8. Gå till meny

Indikatorer

Lucka låst		Maskinens lucka är stängd och låst.
Pågående process		Maskinen kör vald process.
Avslutad process		Grönt sken: Process avslutad utan fel.
		Rött sken: Process avslutad, men fel har uppstått under körningen. Processen ej godkänd.
Larm		Ett larm har utlöst.










Knappar




Öppna luckan		Maskinens lucka låses upp och öppnas.
Mer		Valbar under process.
Navigering		Upp-, Ner-, Höger- samt Vänsterpil används för att styra markören och ändra värden i processbilden, även kallade markörknappar.
		I driftläge används  som START-knapp samt som larmkvittens för att stoppa ljudsignal.
		Vid navigering i maskinens program används  för att välja, mata in eller bekräfta markerat alternativ.
Bakåt		Återgå till föregående fönster eller meny, eller ångra inmatning.
Meny		Gå till huvudmenyn.

Fönster

I fönstret visas information om aktuell process (processfönstret), samt ett antal olika typer av "pop-up"-fönster; Larmfönster, Informationsfönster, Dialogfönster och Inmatningsfönster.

Symboler

Program		Öppna meny för val av program.
Start		Starta valt program.
Larm		Larmsymbolen visas om ett larm har utlösts och ännu inte kvitterats.
Spara		Spara ändringar och inmatade värden.
Numeriskt tangentbord		Skifta från alfabetiskt till numeriskt tangentbord.
Alfabetiskt tangentbord		Skifta från numeriskt till alfabetiskt tangentbord.
Information		En händelse har inträffat. Under pågående process visas hela informationsmeddelandet i processtatusfönstret.
Rättighet saknas		Behörighet för att gå in i menyn saknas.
Rullningslist		Om det finns fler rader än vad som får plats i processbilden visas en rullningslist till höger i bilden. För att komma till raden ovanför eller under så fortsätter man bara trycka på markörknappen.

	Aktiv	Knappen går att trycka på men är inte markerad.
	Vald	Knappen är markerad. Aktivering sker med .
	Inte valbar	Knappen är för tillfället inte tillgänglig.

Handhavande

Öppna luckan

Maskinen är utrustad med elektriskt lucklås. Lucklåsknappen är upplyst då det går att öppna luckan. Luckan kan bara öppnas när:

- Maskinen är ansluten till elnätet
- Maskinen står i standby läge
- Under torkfasen efter en förinställd tid (ca 8 minuter)

För att öppna luckan tryck på lucklåsknappen  och öppna luckan.

För att stänga luckan tryck den uppåt tills den klickar fast i stängt läge.







Lasta diskgoods i maskin

Maximal vikt av diskgoods och diskvagn 8,5 kg gäller både överkorg och vagn. Maximal belastning på luckan i öppet läge 20 kg.


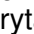

- Lasta diskgodset på diskvagnen och kör in vagnen i maskinen.
- Se till att spolvingarna roterar fritt utan att röra vid diskgodset.

Starta program



Välj en process på ett av följande sätt:

- Markera knappsymbol  och tryck . Markera önskad process i listan och tryck . (Vald process visas i hemmamenyns övre vänstra hörn.). Starta den valda processen genom att markera knappsymbol i displayen och trycka .
- Om Program 1 skall köras kan maskinen startas direkt genom att markera knappsymbol  i displayen och trycka .

Under pågående program


Under processens gång är symbol  tänd och aktuell temperatur samt återstående tid visas i displayen. För att avbryta processen tryck på . Displayknappen "Avbryt process" aktiveras i displayen. Tryck 2 gånger på . Processen stoppas och larm A18 Utlöses. Kvittera larmet och åtgärda enligt anvisningar under rubriken Larmhantering.

Efter programslut

När processen är klar, tänds symbolen  och informationstexten PROCESS KLAR visas i displayen. Luckan kan sedan öppnas med knapp .

- Töm maskinen
- Process P1 väljs alltid automatiskt för nästa körning.

Vid felaktig process


Vid en felaktig eller avbruten process tänds indikator . Godset måste då genomgå en ny process.



Larmhantering





1. Informationstext eller felkod visas här
2. Tänd röd symbol: larmindikering

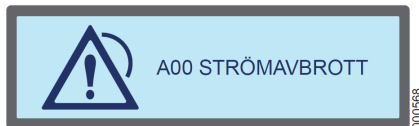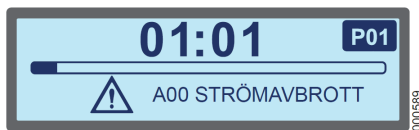


Larm

Om den röda lampan vid  tänds har processen avbrutits på grund av ett fel. En felkod visas i displayen (bilderna visas växelvis).



Kvittera larm genom att:

- Notera felkoden
- Tryck  för att stänga av ljudsignalen. Maskinen förblir låst men processen är stoppad.
- Tryck  igen. I displayen visas nu meny för inmatning av lösenord.
- Åtgärda felet alternativt tillkalla servicepersonal.

- Mata in lösenord (558387) med hjälp av piltangenterna. Markera knapp  och tryck  Maskinen töms på vätska och luckan låses upp. Symbolen  är tänd på panelen och indikerar att den senaste körda processen är klar men inte godkänd.
- Öppna luckan och ta ut godset alternativt starta processen på nytt.



Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

www.getinge.com