



Geringe Diskdesinfektor 88Turbo

Kompetenskort

För att få godkänt på kompetenskortet för " Getinge Diskdesinfektor WD88Turbo" ska även kompetenskort "Rengöring & Desinfektion" vara godkänt.

Funktion

Getinge 88-serien är diskdesinfektorer avsedda för rengöring, desinfektion och torkning. Avsedda användningsområden är kirurgiska instrument (fasta och rörformade), skålar, handfat, glasgods, sugflaskor, babyflaskor, anesthesiutrustning och OP-skor.

Användning av utrustningen

- Maskinen ska endast användas av operatör som utbildats på maskinen och som är införstådd med de risker arbetet kan innebära.
- Operatören ansvarar för att maskinen används riktigt med avseende på manualer, säkerhetsföreskrifter och lagar.
- Du som operatör, bör även se till att du kan nödlarma själv.
- Felaktigt bruk kan leda till skador på föremål och personskador.

LOKALA FÖRESKRIFTER/ÖVRIGT:

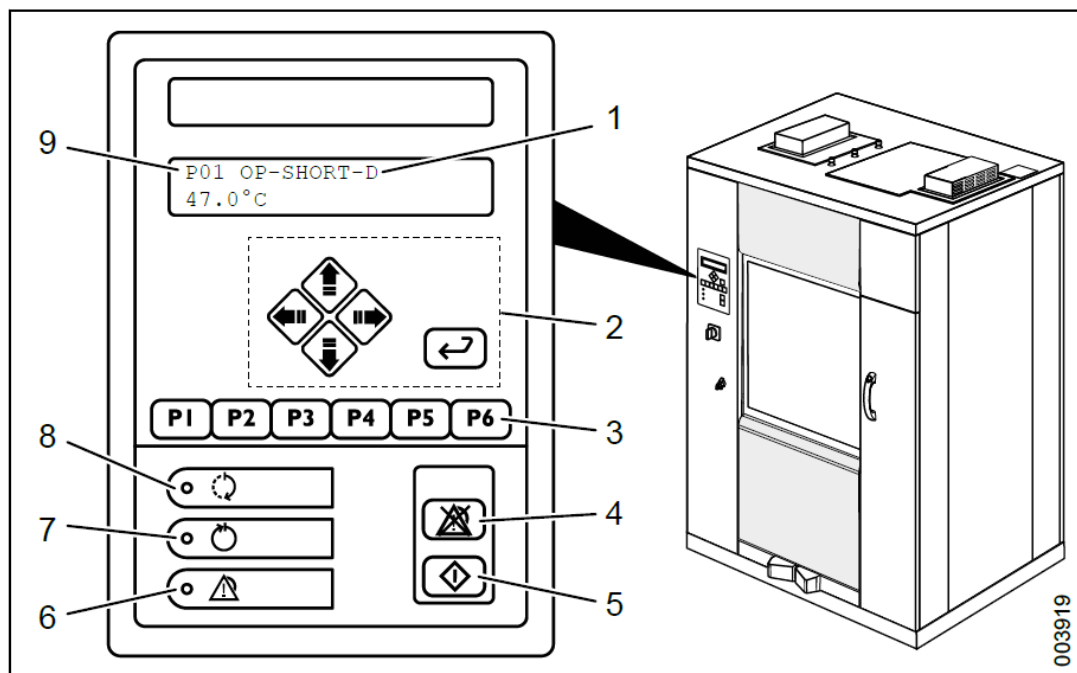
Läs avdelningen lokala riktlinjer.

LEVERANTÖR/KONTAKTUPPGIFTER:

www.getingegroup.com/sv

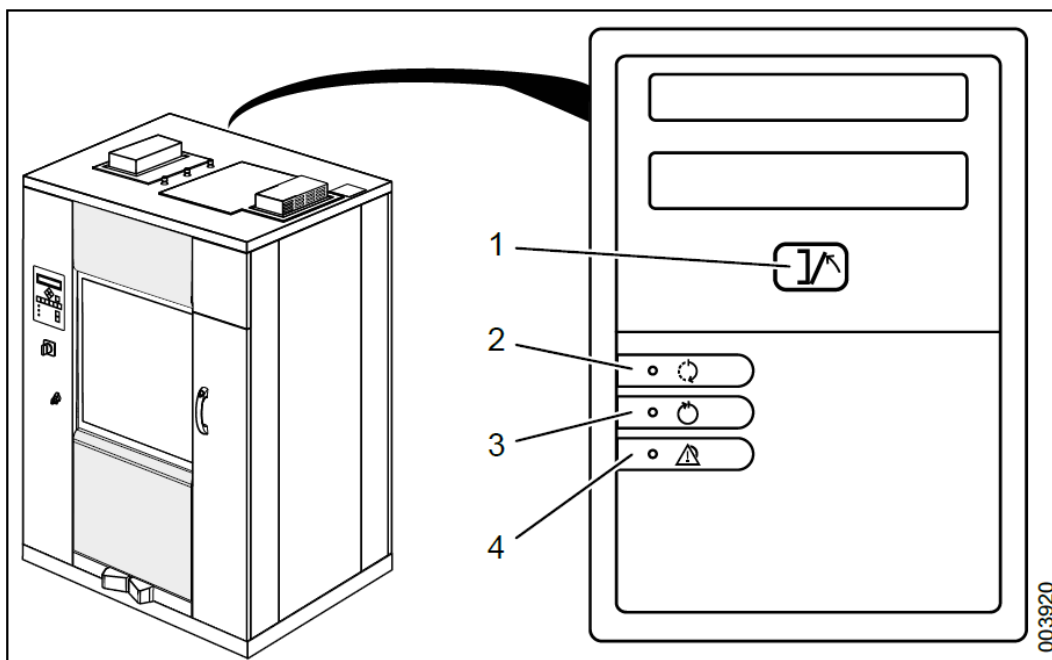
VERSION:
RevG

Manöverpaneler



Panel, ören sida

1. Innan start: valt program
Under körning: programfas (t e x "Sköljning")
2. Menyvalsknappar (se Teknisk manual)
3. Programvalsknappar
4. Knapp för återställning av larm (felkod)
5. Startknapp för diskprogram
6. Röd lampa: felkodsindikering
7. Grön lampa: program färdig
8. Gul lampa: program pågår
9. Programnummer



Panel på ren sida

1. Knapp: Stäng lucka
2. Gul lampa: Program pågår
3. Grön lampa: Program färdig
4. Röd lampa: felkodsindikering

Handhavande

Vid rengöring och desinfektion av hålförmiga instrument med en passage mindre än 2 mm ska ett finfilter användas, för att förhindra att partiklar fastnar i instrumenten. Stoppat eller minskat vattenflöde kan medföra att rengöringsresultat och desinfektion uteblir.

Lasta diskgoods






Lasta diskgoods i maskin med eller utan streckodsscanner

1. Lasta diskgodset på diskvagnen och kör in vagnen i maskinen. Exempel på hur diskvagnen kan lastas finns bland annat i loading handbook.
2. Vikten på diskvagn med gods får vara Max 75 kg.
3. Kör in diskvagnen i maskinen.
4. Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt utan att röra vid diskgodset.

Köra ett program

Lösenordskyddade program




Om det krävs ett lösenord för att starta ett program:

1. Mata in 558387 med hjälp av piltangenterna: Flytta markören åt höger eller vänster med  och . Öka eller minska en siffra med  och .
2. Tryck på  för att bekräfta lösenordet.



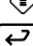
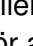
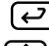

Starta program i maskin utan streckkodsscanner



Välj ett program på ett av följande sätt:

Snabbval:

1. Tryck på en av programvalsknapparna  - .
2. Tryck på .

Valfritt program:

1. Tryck på . Resultat: "VÄLJ PROGRAM" visas i displayen.
2. Tryck på  en gång till. Resultat: Programlistan visas i displayen.
3. Stega upp  eller ner  i listan och välj ett program.
4. Tryck på  för att bekräfta valet.
5. Tryck på .

När ett program startas, blinkar gul lampa vid  i fem sekunder. Under den tiden kan programmet avbrytas genom att trycka på  en gång till.





Starta program i maskin med streckkodsscanner

Kör in vagnen i maskinen så avläsning av streckkod kan ske. Maskinen väljer utifrån streckkoden nu automatiskt diskprogram.

Starta automatiskt valda programmet



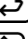


1. Tryck på .



Starta annat snabbval

1. Tryck på .
2. Tryck på en av programvalsknapparna  - .
3. Tryck på .


Starta annat program

1. Tryck på .
2. Tryck på . Resultat: "VÄLJ PROGRAM" visas i displayen.

3. Tryck på  en gång till. Resultat: Programlistan visas i displayen.
4. Stega upp  eller ner  i listan och välj ett program.
5. Tryck på  för att bekräfta valet.
6. Tryck på .

När ett program startas, blinkar gul lampa vid  i fem sekunder. Under den tiden kan programmet avbrytas genom att trycka på  en gång till.



Under pågående program

Under programmets gång är gul lampa vid  tänd och programfas (t ex "Skölj") samt aktuell temperatur visas i displayen.


Se kvarvarande tid: Tryck på .

Avbryta processen: håll  intryckt i 10 sekunder. Detta resulterar i ett alarm.

Efter programslut




1. Se att programmet är klart: Grön lampa vid  tänds. Luckan på ren sida låses upp och öppnas. När luckan är helt öppen släcks den gröna lampan.
2. Tömma maskinen på gods: Dra ut diskvagnen ur maskinen.
3. Göra maskinen klar att laddas med nytt diskgoods: Tryck på . Resultat: Först stängs och låses luckan på ren sida, sedan låses luckan på oren sida upp och öppnas.

Larm

Om den röda lampan vid  tänds har programmet avbrutits på grund av ett fel.

En felkod visas i displayen.

Kvittera felkod genom att:

1. Notera felkoden.
2. Tryck  för att stänga av ljudsignalen. Maskinen förblir låst men programmet är stoppat.
3. Åtgärda felet alternativt tillkalla servicepersonal.
4. Tryck . I displayen visas meny för inmatning av lösenord.
5. Mata in lösenord med hjälp av piltangenterna.
6. Tryck  för att bekräfta lösenordet. Resultat: Maskinen töms på vätska och luckan på oren sida låses upp.
7. Öppna luckan och ta ut godset.

Godset i maskinen är inte rent och måste köras om från start med nytt program.



Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

www.getinge.com